

## Empfehlung Konstruktionsstärken. Digitale Klammerprothesen.


Die Mindeststärke für eine saubere Produktion liegt bei 0,7 mm, jedoch sollten diese Stärken nur bei Oberkieferplatten die geschlossen sind, angewendet werden. Der Abschlussrand bei Oberkieferverbindern sollte in der CAD auf 0,45 mm dünn auslaufen. Es kommt in der Produktion noch zum Abtrag.

Die Konstruktionsstärken in den Bildern dienen als Orientierung.

### Sublingual Bügel

#### Tropfenprofil



Breite  
4,0 mm – 4,3 mm  
Höhe  
2,5 mm +/- 0,3

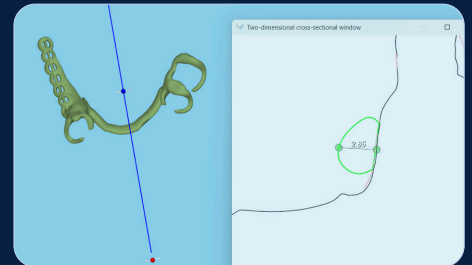

### Klammer Dimension



#### Klammer

Höhe  
cirka 1,2 mm  
Breite  
Klammer-Spitze cirka 1,0 mm  
Klammer-Mitte 2,0 mm  
zur Klammer-Schulter 2,5 mm  
tropfenförmig verlaufend

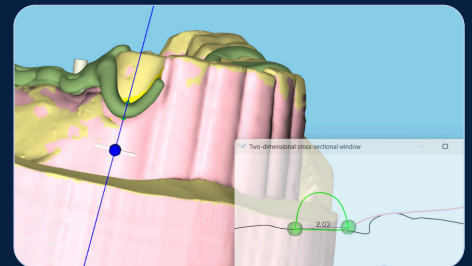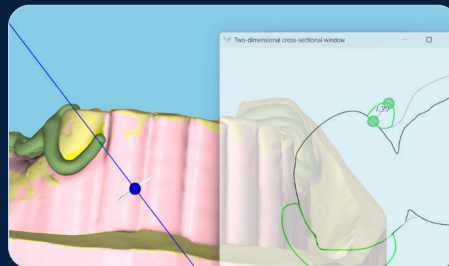


#### Verlauf der Breite bis zur Schulter

#### Oberkiefer Verbinder

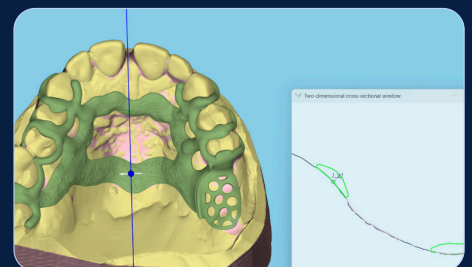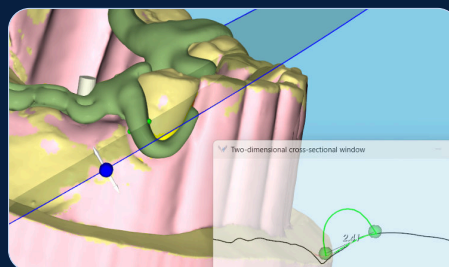

#### Anstilungen

Breite  
3,5 mm – 4,0 mm  
Höhe  
Minimum 3,0 mm

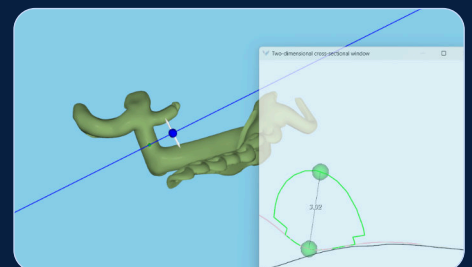

Wir setzen deine Wünsche stets bestmöglich um. Bei sehr dünnwandigen Konstruktionen weisen wir jedoch darauf hin, dass ein erhöhtes Risiko für Beschädigungen während der Produktion besteht.